



YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II-N 型

YALEPIC® Cervical Exfoliated Cell Storage Tube II-N

产品货号：YS21082-B

产品保存及运输条件：常温运输；4 ~ 37°C 保存。

产品概述

YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II-N 型内含 3 ml TCT液基薄层细胞保存液，用于保存女性阴道、宫颈脱落细胞或分泌物，能较大限度的保证细胞的形态和数量的液体，它具有分解黏液和红细胞的能力，使得细胞能够沉积到保存液的瓶底，从而制片时能够得到清晰的背景。此外，这种保存液能够保持细胞成分的丰富，使得样本在常温下可以保存运输长达 4 周。

产品组分

名称	规格
YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II-N 型	10 ml/支, 100 支/盒

试用范围

用于TCT液基薄层细胞检测方法中的宫颈脱落细胞的保存、运输。

注意事项

1. 产品使用前需检查包装密封完整性，包装破损或已过有效期的应禁止使用；
2. 本产品为一次性使用，使用后以医疗废弃物销毁处理；
3. 取样前 24 h 请勿同房或盆浴；取样前 3 天内不能进行阴道冲洗或阴道内用药；
4. 取样时如果出现出血或持续性疼痛，请立即停止操作，必要时前往医院进行处理；
5. 处于月经期、孕期、哺乳期的妇女、生殖道病变（损伤、手术、炎症、肿瘤）、宫颈刚做过手术（冷冻治疗、电烧、锥切、激光）女性避免使用；急性宫颈炎应先治疗，康复后再进行采样。



安装与使用说明

拆开包装，取出子宫颈样本采集器，用子宫颈样本采集器在子宫颈处进行采集样本。

1. 采用半坐卧姿势进行采样；
2. 打开本产品包装，将采样拭子取出，取下套筒；
3. 操作者握住手柄底端，将拭子自阴道缓慢插入,直到安全档片触及阴道口；（注:这里采样头是没有旋转出来的）
4. 顺时针旋转手柄 6 ~ 7 圈，使采样头旋出于阴道采样；
5. 握住手柄，同方向捻转 4 ~ 5 圈；（注：在捻转过程中，保持安全档片触及阴道口）
6. 轻轻从阴道口抽出采样拭子，沿折断点将采样头折入采样管内；
7. 拧紧采样管盖,完成采样。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断。