



# YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I -N 型

## YALEPIC® Cervical Exfoliated Cell Storage Tube I -N

**产品货号:** YS21081-B

**产品保存及运输条件:** 常温运输; 4 ~ 37°C 保存。

### 产品概述

**YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I -N 型**内含 2 ml TCT液基薄层细胞保存液, 用于保存女性阴道、宫颈脱落细胞或分泌物, 能较大限度的保证细胞的形态和数量的液体, 它具有分解黏液和红细胞的能力, 使得细胞能够沉积到保存液的瓶底, 从而制片时能够得到清晰的背景。此外, 这种保存液能够保持细胞成分的丰富, 使得样本在常温下可以保存运输长达 4 周。

### 产品组分

名称	规格
YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I -N 型	5 ml/支, 100 支/盒

### 试用范围

用于TCT液基薄层细胞检测方法中的宫颈脱落细胞的保存、运输。

### 注意事项

1. 产品使用前需检查包装密封完整性, 包装破损或已过有效期的应禁止使用;
2. 本产品为一次性使用, 使用后以医疗废弃物销毁处理;
3. 取样前 24 h 请勿同房或盆浴; 取样前 3 天内不能进行阴道冲洗或阴道内用药;
4. 取样时如果出现出血或持续性疼痛, 请立即停止操作, 必要时前往医院进行处理;
5. 处于月经期、孕期、哺乳期的妇女、生殖道病变 (损伤、手术、炎症、肿瘤)、宫颈刚做过手术 (冷冻治疗、电烧、锥切、激光) 女性避免使用; 急性宫颈炎应先治疗, 康复后再进行采样。



## 安装与使用说明

拆开包装，取出子宫颈样本采集器，用子宫颈样本采集器在子宫颈处进行采集样本。

1. 采用半坐卧姿势进行采样；
2. 打开本产品包装，将采样拭子取出，取下套筒；
3. 操作者握住手柄底端，将拭子自阴道缓慢插入,直到安全档片触及阴道口；（注:这里采样头是没有旋转出来的）
4. 顺时针旋转手柄 6 ~ 7 圈，使采样头旋出于阴道采样；
5. 握住手柄，同方向捻转 4 ~ 5 圈；（注：在捻转过程中，保持安全档片触及阴道口）
6. 轻轻从阴道口抽出采样拭子，沿折断点将采样头折入采样管内；
7. 拧紧采样管盖,完成采样。