



YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II 型

YALEPIC® Cervical Exfoliated Cell Storage Tube II

产品货号: YS21082

产品保存及运输条件: 常温运输; 4 ~ 37°C 保存。

产品概述

YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II 型内含 3 ml 宫颈细胞DNA保存液, 用于女性阴道、宫颈脱落细胞或分泌物DNA样本, 通常搭配宫颈拭子一起使用, 采集完样本后, 4 ~ 37°C 可稳定保存样本中的DNA长达两年, 可用来检测样本中是否存在HPV病毒。

产品组分

名称	规格
YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 II 型	10 ml/支, 100 支/盒

试用范围

可用于宫颈癌筛查研究、HPV检测研究、人体脱落细胞的核酸保存等。

注意事项

1. 产品使用前需检查包装密封完整性, 包装破损或已过有效期的应禁止使用;
2. 本产品为一次性使用, 使用后以医疗废弃物销毁处理;
3. 取样前 24 h 请勿同房或盆浴; 取样前 3 天内不能进行阴道冲洗或阴道内用药;
4. 取样时如果出现出血或持续性疼痛, 请立即停止操作, 必要时前往医院进行处理;
5. 处于月经期、孕期、哺乳期的妇女、生殖道病变 (损伤、手术、炎症、肿瘤)、宫颈刚做过手术 (冷冻治疗、电烧、锥切、激光) 女性避免使用; 急性宫颈炎应先治疗, 康复后再进行采样。



安装与使用说明

拆开包装，取出子宫颈样本采集器，用子宫颈样本采集器在子宫颈处进行采集样本。

1. 采用半坐卧姿势进行采样；
2. 打开本产品包装，将采样拭子取出，取下套筒；
3. 操作者握住手柄底端，将拭子自阴道缓慢插入,直到安全档片触及阴道口；（注:这里采样头是没有旋转出来的）
4. 顺时针旋转手柄 6 ~ 7 圈，使采样头旋出于阴道采样；
5. 握住手柄，同方向捻转 4 ~ 5 圈；（注：在捻转过程中，保持安全档片触及阴道口）
6. 轻轻从阴道口抽出采样拭子，沿折断点将采样头折入采样管内；
7. 拧紧采样管盖,完成采样。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断。